

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM ODSTRAŇOVAČE SILIKONU.

NÁVOD K POUŽITÍ

ODSTRAŇOVAČ SILIKONU je pomocný prostředek, který se používá k odstranění silikonové pružné vložky z akrylové protézy a k odstranění silikonového otiskovacího materiálu z otiskovací pryskyřičné lžice.

ODSTRAŇOVAČ SILIKONU nebrání vytvrzování silikonového materiálu při podložení nebo opětovném otiskování.

OPATŘENÍ

1. ODSTRAŇOVAČ SILIKONU by měli používat pouze licencovaní odborníci v oblasti zubní péče: zubaři, dentální hygienisté nebo zubní technici.
2. Používejte ODSTRAŇOVAČ SILIKONU pouze podle zde uvedených pokynů. Nepoužívejte ODSTRAŇOVAČ SILIKONU k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v těchto pokynech.
3. Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte a dodržujte všechny pokyny výrobce.

Obsah

Odstraňovač silikonu (7 ml)

Klinická aplikace

4. Odstranění silikonové pružné vložky z protéz, například SOFRELINER TOUGH.
5. Odstranění silikonových otiskovacích materiálů z otiskovacích pryskyřičných lžic.

Bezpečnostní opatření

6. Doporučuje se vždy používat vyšetřovací rukavice (plastové, vinylové, latexové) a ochranné brýle, aby se předešlo možným alergickým reakcím na akrylové monomery. Pokud ODSTRAŇOVAČ SILIKONU přijde do kontaktu s rukavicemi, okamžitě rukavice vyhodte a důkladně si umyjte ruce vodou. V případě kontaktu s pokožkou umyjte pokožku mýdlem a poté důkladně opláchněte vodou.
7. Zajistěte, aby ODSTRAŇOVAČ SILIKONU nepřišel do kontaktu s pacientem. V případě kontaktu s pokožkou pacienta umyjte pokožku mýdlem a poté důkladně opláchněte vodou.
8. VYHNĚTE SE KONTAKTU S OČIMA. V případě kontaktu s očima důkladně vypláchněte oči vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

9. Nepoužívejte ODSTRAŇOVAČ SILIKONU v ústech nebo na dásních pacienta. ODSTRAŇOVAČ SILIKONU musí být aplikován pouze na protézu nebo otiskovací pryskyřičnou lžici a vždy mimo ústa pacienta.
10. ODSTRAŇOVAČ SILIKONU je vysoce hořlavá a těkavá kapalina. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně. Používejte v dobře větraném prostoru.
11. Aby nedošlo k riziku křížové infekce, nedotýkejte se hrdla lahvičky protézou nebo podložkovým materiálem.

Klinická opatření

12. Při odlupování může ODSTRAŇOVAČ SILIKONU stříkat. V případě kontaktu s očima důkladně vypláchněte oči vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. V případě kontaktu s pokožkou pacienta umyjte pokožku mýdlem a poté důkladně opláchněte vodou.
13. Při používání ODSTRAŇOVAČE SILIKONU vždy používejte čistý, nový plastový kelímek a štětec. Zbytky zubních materiálů v dříve použitých kelímcích a štětcích, například samovytvrzující pryskyřice, obsahují zbytky katalyzátorů, které mohou způsobit vytvrzení ODSTRAŇOVAČE SILIKONU.
14. Nepoužívejte tento produkt, pokud je bezpečnostní pečeť porušena nebo pokud byl obsah znehodnocen.
15. Neponořujte protézu nebo pryskyřičnou lžici do kapaliny ODSTRAŇOVAČE SILIKONU. Jinak bude povrch akrylové pryskyřice nepoužitelný.
16. Nepoužívejte kapalinu samovytvrzující pryskyřice místo ODSTRAŇOVAČE SILIKONU. Přířady v kapalině mohou ovlivnit přilnavost k protéze při podložení.
17. ODSTRAŇOVAČ SILIKONU nelze použít k odstranění měkké zubní vložky na bázi akrylové pryskyřice a tkáňového kondicionéru.

Pokyny k uchovávání

18. Uchovávejte materiál při teplotě 0-25°C.
19. NEPOUŽÍVEJTE materiál po datu expirace.
20. Po použití pevně uzavřete víčko.
21. Aby nedošlo k náhodnému požití nebo rozlité, VŽDY uchovávejte mimo dosah dětí a pacientů.

Pokyny k likvidaci

Zbytky ODSTRAŇOVAČE SILIKONU by měly být absorbovány do gázy nebo bavlny a zlikvidovány v souladu s federálními a/nebo místními předpisy. Vyhněte se inhalaci těkavé látky.

Návod k použití

22. Odkryjte akrylový povrch tak, že silikonový materiál naříznete na šířku 2-5 mm a délku 10-20 mm chirurgickým nožem (viz Obr. 1).
23. Do vytvořené prohlubně kápněte několik kapek ODSTRAŇOVAČE SILIKONU a nechte působit 5-10 sekund (viz Obr. 2).
24. Přidejte několik dalších kapek ODSTRAŇOVAČE SILIKONU, vložte nástroj nebo špachtli mezi silikon a akrylovou pryskyřici a poté pomocí nástroje nebo špachtle odstraňte silikonový materiál z akrylové pryskyřice (viz Obr. 3). Pokud je to nutné, přidejte do vytvořené prohlubně několik dalších kapek ODSTRAŇOVAČE SILIKONU, aby bylo odstranění snazší.

Podložení a opětovné otiskování

Podložení nebo opětovné otiskování se provádí následovně:

25. Odstraňte povrch přilnavé plochy protézy nebo pryskyřičné lžice pomocí brusky.
26. Opláchněte a osušte.

Výrobce nenes odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím tohoto produktu. Je odpovědností uživatele zajistit, aby byl produkt vhodný pro zamýšlenou aplikaci.